

Bacillol AF

Priemonė greitai paviršių dezinfekcijai

SUDĖTIS. 100g tirpalo yra: 45,0g 1-propanolio; 25,0g 2-propanolio ir 4,7g etanolio.

SAVYBĖS. Bespalvis skystis, turintis alkoholio kvapą. Paruošta naudoti.

VEIKIMAS. Baktericidinis (įsk. MRSA, TBC, mikobakterijas), mielicidinis, fungicidinis, virusidinis prieš apvalkalėlių turinčius virusus (HBV, ŽIV, HCV), Adeno, FCV, MNV, Polyoma ir Rota virusus. Greitai suyra aplinkoje.

Veikimas	Laikas
Baktericidinis, mielicidinis	15s
Fungicidinis	5min
Tuberkulicidinis, mikobaktericidinis	30s
Virusidinis (įsk. HBV HIV, HCV), adenovirusas	30s
Polyoma virusas	10min
Rotavirusas, MNV	1min
Maisto pramonė	
Baktericidinis, mielicidinis	1-5min
Fungicidinis	5min

PASKIRTIS. Nedidelių aplinkos paviršių ir medicinos prietaisų greitai dezinfekcijai. Tik profesionaliesiems naudotojams. Profesionalieji naudotojai turi taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Bacillol AF sudėtyje yra tik alkoholiai, todėl priemonė tinka maisto ruošimo ir gamybos srityje: išlaikius ekspoziciją, maistas gali tiesiogiai liestis su dezinfekuotu paviršiumi. Priemonė naudojamas dezinfekcijai kirpyklose, grožio salonuose: plaukų kirpimo mašinėlėms, šukoms, plaukų kirpimo žirkelėms, nedideliems paviršiams dezinfekuoti.

NAUDOJIMAS

- Biocidinio produkto naudojimo instrukcija (2 ir 4 produktų tipai)

Nedidelių paviršių dezinfekcijai. Nuvalytą, švarų paviršių apipurkšti priemone iš 30cm atstumo. Didesniam efektyvumui pasiekti rekomenduojama išpurkštą paviršių šluostyti preparatu sudrėkinta vienkartinio naudojimo servetėle. Sveikatos priežiūros, visuomeninės paskirties įstaigose ekspozicijos laikas iki 5min., maisto gamybos iki 30min (siekian sunaikinti virusus), greitai dezinfekcijai- 30s.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. 11(11.1)-(A-0204PNO601515-15-47)-BSV-3259, galioja iki 2020-03-19.

- Medicinos prietaiso naudojimo instrukcija (IIa klasė)

Skirta: medicinos prietaisų greitai dezinfekcijai; maisto ruošimo įmonėse paviršių dezinfekcijai. Netinka invazinių medicinos prietaisų dezinfekcijai. Ekspozicija- 30s. Netinka alkoholiui jautriems paviršiams, taip pat pagamintiems iš akrilo, Plexiglas.

Nedideliems paviršiams sunaudojama iki 50ml/m² priemonės, dezinfekuojant sienas, grindis - iki 100ml/m².

IPAKAVIMAS: 0,5; 1,0; 5,0 l talpos.
0,5 ir 1,0l talpoms reikalingas purkštukas.

GAMINTOJAS. BODE Chemie GmbH, Vokietija.

PLATINTOJAS : UAB "Armila", Molėtų pl.75, Vilnius, tel. 8-800-20017, 8-5 2771732.

